

fluorecare® SARS-CoV-2- & Influenza-A/B- & RSV-Antigen-Kombi-Testkit (Kolloidales Gold Chromatographischer Immunotest) Testverfahren

Produkt-Code: MF-71



Tupfer

1. Nasenabstrich

1.1 Vor Verwendung des Kits die Hände waschen oder desinfizieren. Sicherstellen, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie beginnen.



1.2 Überprüfung aller Testkomponenten

Kit-Bestandteile



Testkarte im Folienbeutel x 1




Tupfer x 1




Behandlungsröhrchen mit Tropferdeckel x 1

1.3 Den Folienbeutel öffnen, die Testkarte herausnehmen und auf eine ebene Fläche, z. B. einen Tisch, legen. Den Bereich zur Beobachtung der Ergebnisse und die Probenlöcher nicht berühren.


1.4 Illustration der Probenahme (Nasenabstrich)

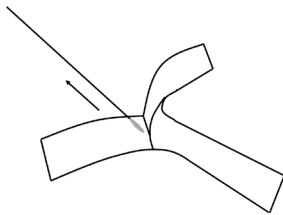

1 Sterilen Nasentupfer vorsichtig aus der Verpackung nehmen. (das Ende mit dem Wattestäbchen nicht berühren)

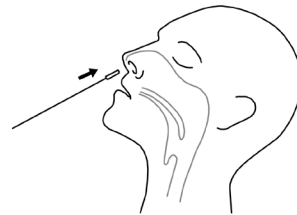

2 Nasentupfer in das linke Nasenloch bis 2,5cm vom Rand des Nasenlochs einführen.

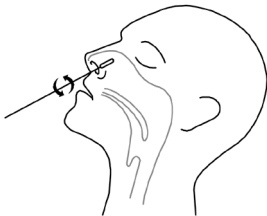

3 Nasentupfer 5 Mal an der Nasenwand (Schleimhaut) drehen, um ausreichende Probe zu erhalten.




4 Den Vorgang im rechten Nasenloch mit demselben Nasentupfer wiederholen, um noch mehr Probe zu erhalten.

1.5 Nasen-Rachen-Abstrich



1. Den Kopf des Patienten nach hinten kippen und Probe aus dem Nasenloch entnehmen, in dem sich mehr Schleim befindet (Kopf nach hinten neigen).
2. Tupfer durch das Nasenloch einführen und dann langsam am Boden der Nasenhöhle entlang fahren (vorsichtig bewegen, um traumatische Blutungen zu vermeiden).
3. Wenn Tupferspitze die hintere Wand des Nasen-Rachen-Raums erreicht, den Tupfer einige Male vorsichtig drehen. (Möglichst viel Sekret aufnehmen).
4. Um Reflexhusten zu vermeiden, eine Minute lang anhalten.
5. Den Tupfer langsam herausnehmen.
6. Die Probe so bald wie möglich testen.

1.6 Probe Verwenden

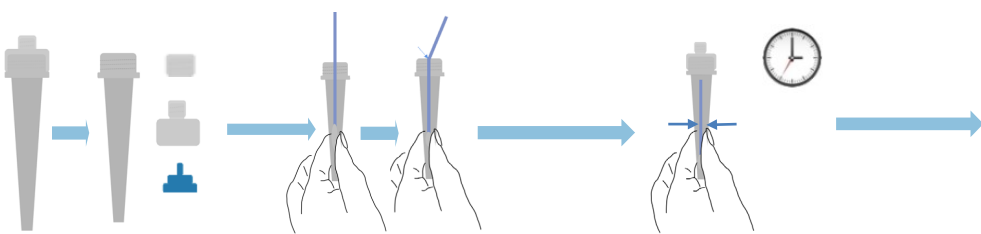

1 Kappe des Tropf-
röhrchens öffnen, dabei
den oberen Verschluss
öffnen und den inneren
Stopfen entfernen.

2 Tupferprobe in das
Röhrchen einsetzen, Tupfer
am Tupferknoten abbrechen
und die untere Hälfte im
Röhrchen belassen.

3 Tropferdeckel aufsetzen,
Tupfer im Röhrchen 10-mal
zusammen drücken und 1
Minute reagieren lassen.

4 Senkrecht 2 Tropfen* (ca.
60µL) der Probenlösung in das
Probenloch geben, dann 15
Minuten bei Raumtemperatur
warten.*


* Vor der Zugabe den Verschluss oben am Deckel und den blauen inneren Stopfen entfernen. Sonst kann die
Probelösung nicht zugegeben werden! **Nur 2 Tropfen der Probenlösung zugeben! Zu viel oder zu wenig Zugabe
der Probelösung kann zu ungültigen Testergebnissen führen.**

* Nach Zugabe der Probe die untere Kappe auf das Röhrchen aufsetzen und das Ganze als Schadstoff entsorgen.

2

Virus-Transportmedien (VTM)

Probe Verwenden

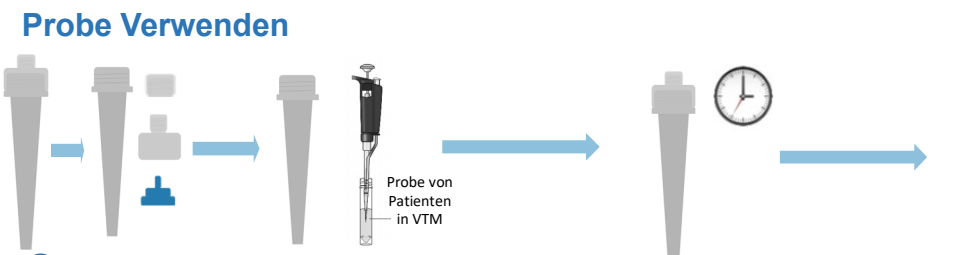

1 Kappe des Tropf-
röhrchens öffnen, dabei den oberen
Verschluss öffnen und den inneren Stopfen
entfernen.

2 500µL Probe (VTM)
in das Röhrchen geben.

3 Tropferdeckel
aufsetzen, dann 1
Minute reagieren
lassen.

4 Senkrecht 2 Tropfen* (ca.
60 µl) der Probe in das
Probenloch geben und dann
15 Minuten bei Raum-
temperatur warten, bis die
Reaktion abgeschlossen ist.*


* Vor der Zugabe den Verschluss oben am Deckel und den blauen inneren Stopfen entfernen. Sonst kann die
Probelösung nicht zugegeben werden! **Nur 2 Tropfen der Probenlösung zugeben! Zu viel oder zu wenig Zugabe
der Probelösung kann zu ungültigen Testergebnissen führen.**

* Nach Zugabe der Probe die untere Kappe auf das Röhrchen aufsetzen und das Ganze als Schadstoff entsorgen.

3

Ergebnis ablesen

3.1 Ergebnis von COVID-19-Antigen

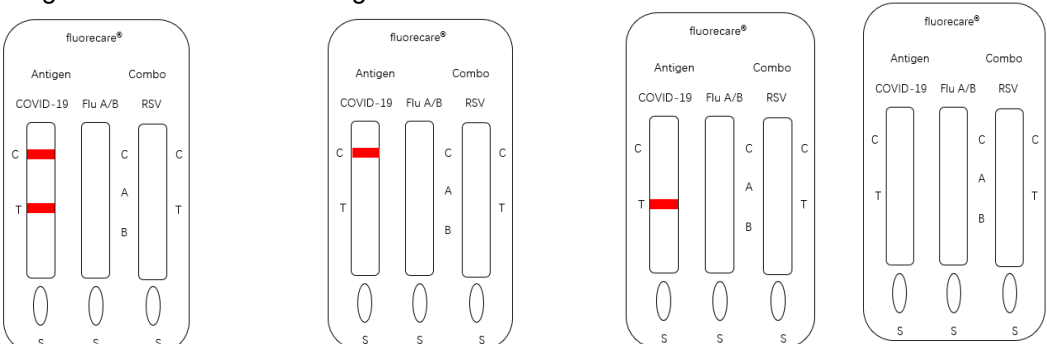


Positiv


Negativ

Ungültig

3.2 Ergebnis von Influenza-A/B

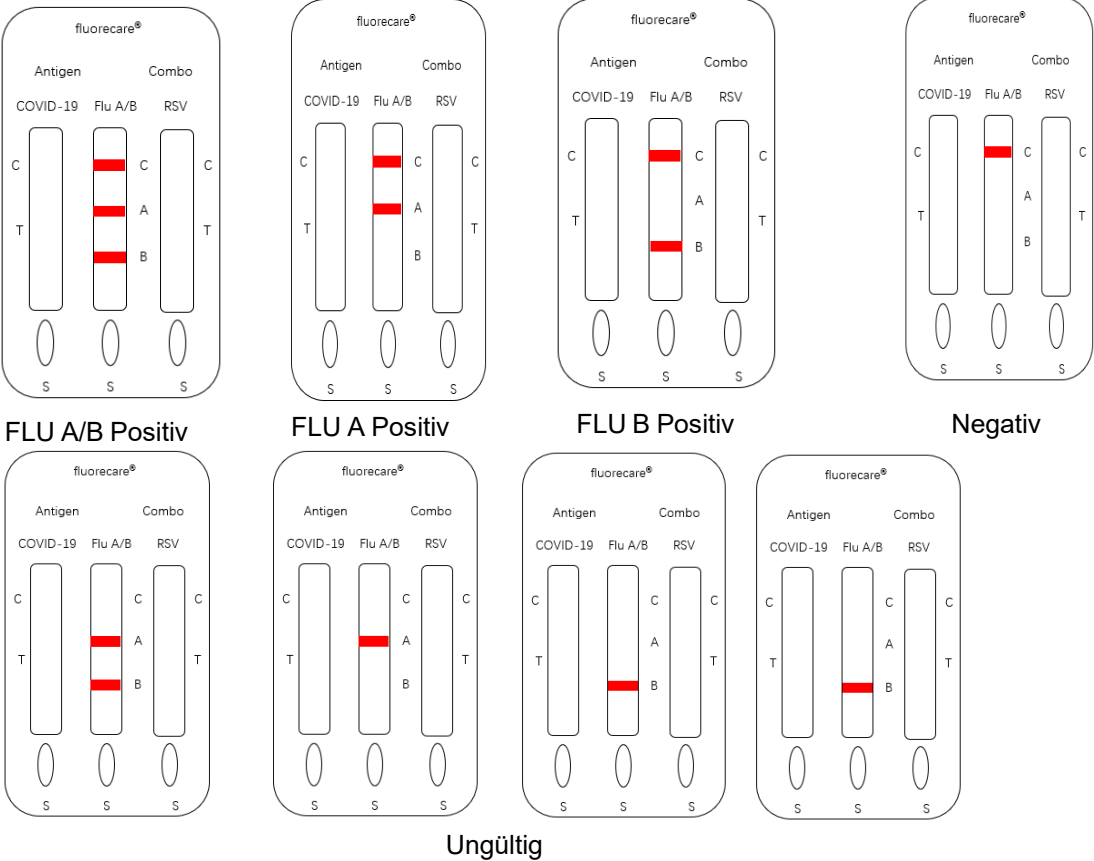

3.2 Ergebnis von RSV

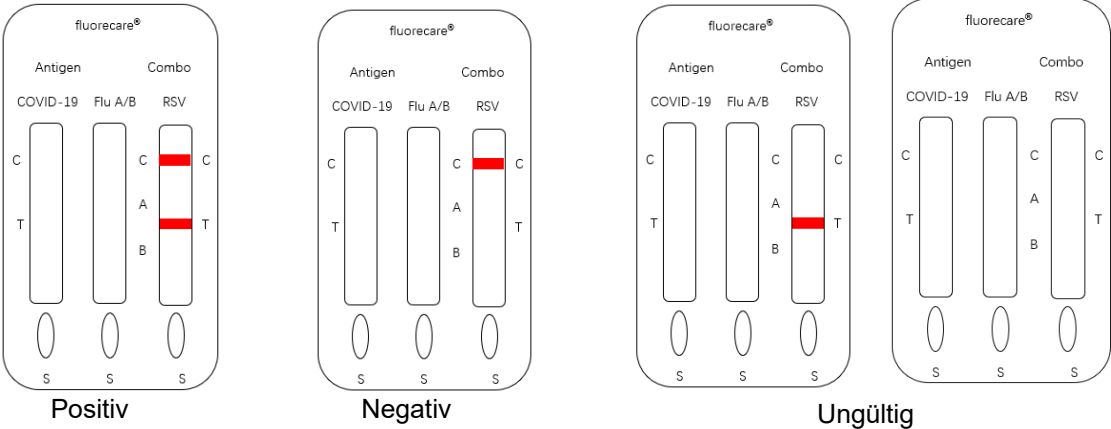

4

Schadstoffbehandlung nach Tests

Bitte verbrauchte Testkits
und Probenröhrchen als
Medizin-Abfall behandeln

